

ALKOMAT CYFROWY-ZEGAR BUDZIK TERMOMETR MODEL: AL5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


1. Informacje ogólne

- Alkomat jest bardzo estetycznie wykonany, charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami - bez problemu zmieści się w kieszeni spodni.
- Najnowocześniejsza generacja sensorów pomiarowych.
- Bardzo prosta obsługa - wystarczy dmuchnąć, poczekać kilka sekund i sprawdzić wynik.
- Charakteryzuje się bardzo szybkim pomiarem.
- Wbudowany, czytelny wyświetlacz LCD z czerwonym podświetleniem do odczytywania wyników pomiarów oraz mniejszy wyświetlacz do odczytywania godziny i daty..
- Posiada możliwość zmiany jednostek pomiarowych. Przeliczenie wyniku na promile: Jeżeli chcecie przeliczyć wynik na promile należy przesunąć przecinek w wyniku pomiaru %BAC np.: 0,04%=0,4 promila.

Specyfikacja

Zakres pomiarowy: 0.000% - 0.19% BAC (0.00-1.9‰BAC / 0.000-0.995mg/l BRAC)

- 3 jednostki pomiarowe: %BAC, ‰BAC, mg/L
- Dokładność: 0.01% %BAC
- Podwójny wyświetlacz LCD
- Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru
- Zegar oraz alarm (budzik), odliczanie czasu
- Wbudowany termometr
- Zasilanie: 2x bateria AAA 1,5V
- Wskaźnik niskiego stanu baterii: tak
- Funkcja automatycznego wyłączenia w celu oszczędności baterii: tak
- Podświetlenie: tak, czerwone
- Sygnalizacja dźwiękowa końca pomiaru: tak
- Kolor: czarno-biały
- Wymiary: 119 x 31 x 22 mm

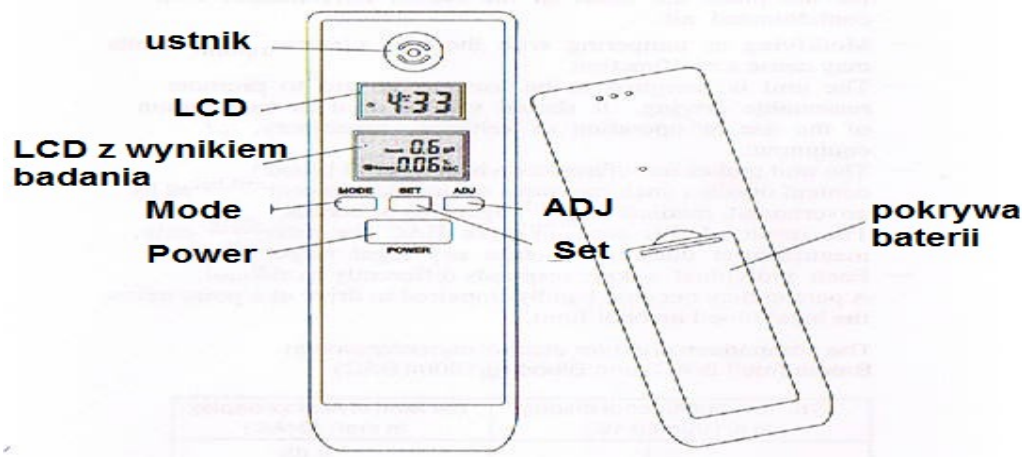

2. Pomiar zawartości alkoholu

- Przytrzymaj przycisk „Power” przez 1 sek, nastąpi proces „rozgrzania” się alkomatu, o jego zakończeniu zostaniesz poinformowany sygnałem „beep” licznik odliczający dojdzie do zera.
- Wówczas należy dmuchać w ustnik, przez 10 sekund, o zakończeniu tego procesu również poinformuje Cię sygnał „beep”, po którym zostanie podany wynik.

3. Inne funkcje

Ustawienie czasu

Przycisk „ADJ” zmienia format wyświetlania czasu (12h lub 24h).

Przytrzymaj przycisk „Set” przez 2 sek. przejdziesz w trym edycji, przyciskiem „ADJ” zmieniasz wartość, przyciskiem „Set” przechodzisz do kolejnej wartości.

Należy pamiętać iż edycję czasu, alarmu itd.. jest możliwa w momencie gdy przyciskiem „Mode” zmienisz na pozycję wymagającą zmiany.

4. Uwagi i środki ostrożności

- NINIEJSZY ALKOMAT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE W CELU ORIENTACYJNEGO ZMIERZENIA STĘŻENIA ALKOHOLU WE KRWI!
- Urządzenie przeznaczone do użytku indywidualnego, nie może być stosowane do celów lekarskich bądź diagnostycznych!
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie otwieraj urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Używać tylko oryginalnych alkalicznych baterii - używanie akumulatorów może powodować błędny pomiar.
- Chronić przed zrzuceniem, wstrząsami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawdowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawdowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.