

## MAGNETYCZNY KOREKTOR WAD POSTAWY BQ23A



### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

#### 1. Informacje ogólne

Magnetyczny korektor wad postawy - popularny! Pozwala zachować prawidłową postawę kręgosłupa niezależnie od pozycji w której przebywamy. Zapobiega ewentualnym skrzywieniom kręgosłupa, zapobiega uczuciu dyskomfortu.

#### Cechy i specyfikacja produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Skutecznie redukuje ryzyko wystąpienia wad postawy.
- Pomaga zachować prawidłową postawę, zarówno podczas stania i siedzenia.
- Niweluje garbienie się bez irytującego bzyczenia elektronicznego pajęczka.
- Noszenie korektora zmniejsza dyskomfort z powodu nieprawidłowej pozycji kręgosłupa.
- W pełni bezpieczny! Może być stosowany przez kobiety, mężczyzn i dzieci.
- Produktu należy używać maksymalnie 2-3 godziny dziennie!
- **Uniwersalny rozmiar. Łatwo dopasowuje się do kształtu ciała.**
- **Kolor: czarno-zielony**
- Opakowanie: kolorowe, estetyczne pudełko

#### 2. Użytkowanie

- a) Rozpakuj urządzenie z opakowania i poluzuj paski po obu stronach.
- b) Załóż korektor postawy na plecy, przekładając ramiona przez paski. Upewnij się, czy magnesy znajdują się wewnątrz korektora i przylegają do kręgosłupa.
- c) Dopasuj paski do pożądanej długości za pomocą ściągaczy i zaciśnij je tak, aby korektor ściśle przylegał do pleców.

**UWAGA:** Rozpoczynając korzystanie z korektora używaj go do około 2-3 godzin dziennie. Stopniowo zwiększaj ten czas do całego dnia, jeżeli nie odczuwasz dyskomfortu.

#### 3. Uwagi i środki ostrożności

- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



**OSOBA ODPOWIEDZIALNA:**

*APTEL Sp. z o.o.  
15-680 Białystok, Polska  
ul. Produkcyjna 106B  
mail: [gpsr@aptel.pl](mailto:gpsr@aptel.pl)*

**PRODUCENT:**

*Boxuntong Sheng Ltd  
Building 12, Huayao City, Pinghu Town,  
Longgang District,  
Shenzhen, China  
[boxuntongsheng@gmail.com](mailto:boxuntongsheng@gmail.com)*